

To make your
workflow excellent.



Microvette微量採血管 SARSTEDTセーフティランセット

毛細血管血採血器具

ご注文受付
カスタマーサービス TEL. 0495-71-9300
FAX. 0495-71-9320

選任製造販売業者 / 販売元
ザルスタット株式会社

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル
TEL 03-3526-3530
FAX 03-3526-0870

大阪営業所
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル
TEL 06-6339-6886
FAX 06-6339-8976

福岡営業所
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27 AS OFFICE博多606
TEL 092-433-3600
FAX 03-3526-0870

● 記載されている内容は、製品の改良などに伴い予告なく変更することがあります。

268R14-1



管理医療機器




Microvette®

キャピラリー採血タイプ



キャピラリーはプラスチック製で破損の恐れがなく、突き刺し事故及び感染症の防止に役立ちます。

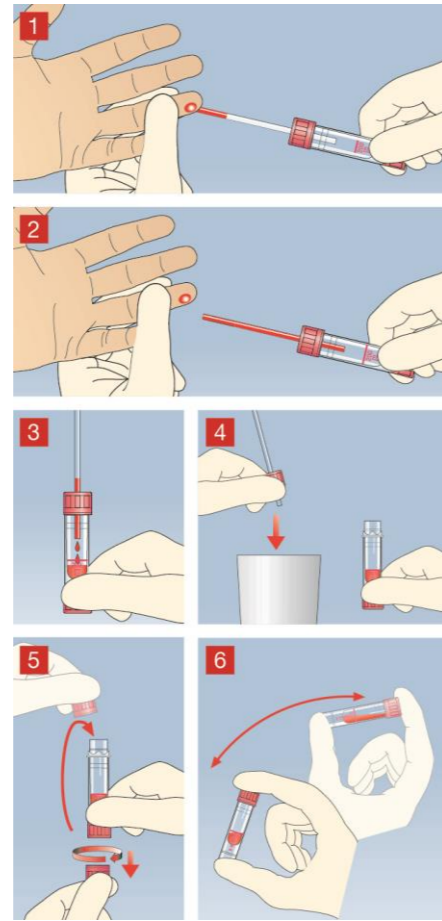

1. ランセットなどで皮膚を穿刺し、表面に漏出した血液を水平に保持したキャピラリーの先端で採取する。

2. キャピラリーが満たされるまで血液を採取する。
注)キャピラリーが血液で完全に満たされるまで本体を立てないでください。規定容量採取できなくなる恐れがあります。


3. 本体を垂直に保持し、キャピラリーより血液が本体内部に流れ落ち切るのを待つ。

4. キャピラリーと上部キャップを廃棄する。

5. 底部キャップで閉栓する。

6. 緩やかに転倒混和する。

リム採血タイプ

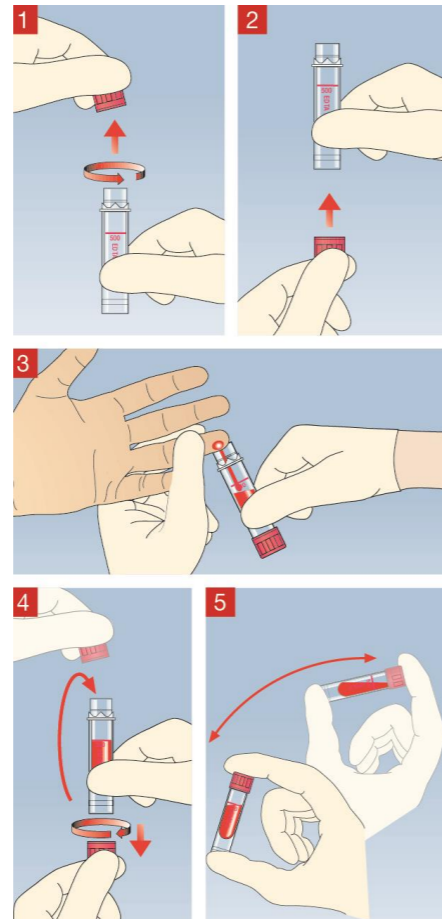

1. 本体からキャップを取り外す。

2. 取り外したキャップを本体底部にはめる。
*キャップの取り違い防止になります。

3. ランセットなどで皮膚を穿刺し、表面に漏出した血液を穿刺部位より下に位置する採血管本体内部に採取する。

4. 底部キャップで閉栓する。

5. 緩やかに転倒混和する。

オーダーインフォメーション

Art.No.	製品名	採血量	採血方式	添加物	インナーチューブ	カラーコード
20.1280.100	Microvette微量採血管 100 CAT	100µl	キャピラリー	凝固促進剤	V底	赤
20.1282.100	Microvette微量採血管 100 LH	100µl	キャピラリー	ヘパリンリチウム	V底	緑
20.1278.100	Microvette微量採血管 100 K3E	100µl	キャピラリー	EDTA K3	丸底	紫
20.1290.100	Microvette微量採血管 200 CAT	200µl	キャピラリー	凝固促進剤	V底	赤
20.1291	Microvette微量採血管 200 CAT-Gel	200µl	キャピラリー	凝固促進剤/ゲル	丸底	茶
20.1292.100	Microvette微量採血管 200 LH	200µl	キャピラリー	ヘパリンリチウム	V底	緑
20.1288.100	Microvette微量採血管 200 K3E	200µl	キャピラリー	EDTA K3	丸底	紫
20.1308.100	Microvette微量採血管 300 CAT	300µl	リム	凝固促進剤	V底	赤
20.1309.100	Microvette微量採血管 300 LH	300µl	リム	ヘパリンリチウム	V底	緑
20.1343.100	Microvette微量採血管 500 CAT	500µl	リム	凝固促進剤	丸底	赤
20.1344	Microvette微量採血管 500 CAT-Gel	500µl	リム	凝固促進剤/ゲル	丸底	茶
20.1345.100	Microvette微量採血管 500 LH	500µl	リム	ヘパリンリチウム	丸底	緑
20.1346.100	Microvette微量採血管 500 LH-Gel	500µl	リム	ヘパリンリチウム/ゲル	丸底	緑
20.1341.100	Microvette微量採血管 500 K3E	500µl	リム	EDTA K3	丸底	紫
20.1339.100	Microvette微量採血管 500 K2E	500µl	リム	EDTA K2	丸底	紫
55.1571*	アダプタチューブ φ13 x 65mm	-	-	-	-	-

*Microvetteに装着することで標準的な採血管のサイズの13×75mmとなり一般的な遠心分離機に掛けられます (1,000本入)。
管理医療機器 販売名: Microvette微量採血管 医療機器認証番号: 301AKBZI00011000 未滅菌 各100本入

セーフティランセット



1. 先端の保護キャップをねじり、本体から外す。

2. 洗浄した穿刺部位にセーフティランセットをしっかりと押し付け、穿刺ボタンを押す。

オーダーインフォメーション

Art.No.	製品名	針サイズ	穿刺深度	20秒後採血量*	120秒後採血量*	カラーコード
85.1015	SARSTEDTセーフティランセット、Mini	28G	1.6mm	50µl	150µl	ブルー
85.1016	SARSTEDTセーフティランセット、Normal	21G	1.8mm	100µl	500µl	グリーン
85.1017	SARSTEDTセーフティランセット、Extra	18G	1.8mm	150µl	750µl	イエロー
85.1018	SARSTEDTセーフティランセット、Super	刃・1.5mm幅	1.6mm	150µl	900µl	パープル
85.1019	SARSTEDTセーフティランセット、Neonatal	刃・1.5mm幅	1.2mm	100µl	450µl	ピンク

*採血量は皮膚の状態や血流により異なりますので、この数値はあくまで目安となります。
管理医療機器 販売名: SARSTEDTセーフティランセット 医療機器認証番号: 304AGBZI0003000 滅菌済 各200個入

本製品の使用にあたっては製品の「電子添文」を必ずよく読み、正しくお使いください。