


人命救助の場において
一秒一秒が命に関わります。

バキュエット® 採血管 トロンビン・凝固促進剤・分離剤入り

VACUETTE CAT高速管は、検査時間の短縮と正確な検査値を導き
適切な診断と治療の促進につながります。¹



販売名 バキュエット採血管
医療機器認証番号 227AABZX00029000

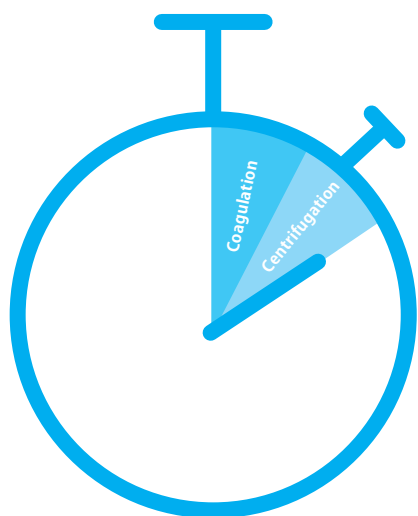

分析までわずか10分で完了

VACUETTE CAT高速管が選ばれる理由：

- 待ち時間わずか5分で全血サンプルの凝固を可能にします。
- 検査受付から検査終了までの所要時間（ターンアラウンドタイム）を通常の75%短縮させます。
- より速く検査結果を得られ、患者様のためにより敏速に適切な治療を開始できます。

利点



凝固プロセスの最適化

遠心後の再凝固を低減し、分析前の不備を最小限にします。



より速い検査結果

ターンアラウンドタイムが75%短縮され、患者様へ迅速な治療が可能になります。

わずか5分で凝固完了

革新技術を駆使してVACUETTE CAT高速管は血清分離チューブと血液凝固活性化剤 (BCA) および血液凝固促進剤トロンビンの利点を組み合わせることで、ターンアラウンドタイムの短縮を実現しました²。トロンビンは血液凝固促進剤として機能し、わずか5分間で凝固プロセスを完了させます。³

遠心分離時間が5分の場合、採血から分析までの時間は10分となり、従来の血清チューブを使用した場合の所要時間40分と比較し大幅な時間節約が期待できます。



バキュエット採血管* トロンビン・凝固促進剤・分離剤入り

内包装/外包装 (個数) : 50/1200

製品番号	血液採取量	キャップカラー	リングカラー	チューブタイプ	サイズ	ラベル	受注発注
454592	3.5 ml	■オレンジ	■イエロー	PREMIUM	13 x 75	紙	○
476309JP	5 ml	■オレンジ	■イエロー	PREMIUM	13 x 100	透明	

*PREMIUMタイプはねじ型のツイストキャップとなっています。

参考文献と情報

- ヘパリン、トロンビン阻害剤治療を受けている患者様やフィブリノーゲン欠乏症の患者様における凝固時間の性能は確認されていません。テストされたパラメーターの詳細につきましてはwww.gbo.com/preanalyticsの研究結果をご参照下さい。
- 診断結果における抗凝固剤の使用は世界保健機構WHO/DIL/LAB/99.1_Rev2_2022年に基づいております。
- Greiner Bio-Oneは、VACUETTE CAT高速管に対して次の遠心設定を推奨しております ; 3000G/5分または1800G/10分

さらに多くの製品を探す
shop.gbo.com

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店