

歯周病スクリーニング検査用

唾液採取セットA

取扱説明書

この説明書をよく読んでから使用してください。

本品は弊社取扱いの免疫学的唾液中ヘモグロビン検出用試薬専用の唾液採取セットです。

【測定試料の性質】

唾液は新鮮なものを使用してください。

【唾液採取上の留意事項】

1. 必ず、サリバーガム、唾液採取用綿棒を使用して唾液採取を行ってください。
2. 唾液採取前の2時間は飲食及び歯磨きを避けてください。
3. 口内炎等による出血が唾液に混入すると、正しい結果が得られない場合があります。
4. 唾液採取後はすみやかに唾液採取用綿棒に浸し唾液採取容器に差しして試料としてください。
5. やむを得ず試料を保管する場合は冷暗所保存してください。

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 検体中には、HBV、HCV、HIV等の病原体が存在する可能性がありますので、感染予防のため取扱いに注意してください。また、唾液及び試料に接触した器具、試薬及び試薬容器等は、感染の危険性があるものとして、以下の方法で処理し廃棄してください。
 - ① 121℃ 1時間のオートクレーブ処理
 - ② 終濃度1.0%の次亜塩素酸ナトリウムに1時間以上浸漬
 - ③ 終濃度1.0%のグルタルアルデヒドに1時間以上浸漬

2. 唾液採取容器の中の液にはホウ酸が含まれています。濃度は0.3%未満です。また、アジ化ナトリウムが含まれています。濃度は0.1%未満ですので毒物には該当しません。唾液採取容器の中の液が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着したりした場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。
3. 容器や付属品等は当検査以外の目的に転用しないでください。
4. 測定操作時にはディスポーザブルの手袋等を着用してください。
5. 唾液採取容器に追加でラベルを貼付する場合は、剥がれないようにしっかり貼付してください。

【廃棄上の注意】

1. 唾液採取容器の中の液にはアジ化ナトリウムが含まれており、鉛、銅等の重金属と反応して、爆発性のアジ化物を形成することがあります。廃棄するときは、アジ化物が形成されないように大量の水で洗い流してください。
2. 本品を廃棄するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。

【貯法・有効期間】


1. 貯 法：1～30℃
2. 有効期間：2年

【内 容】


カップ(白)、サリバーガム、唾液採取用綿棒(オレンジ)、唾液採取容器(キャップ(グレー)付き)、提出用袋

【使用方法】

- ① カップを広げてください。
- ② サリバーガムを3分間噛んで、口内にたまった唾液をカップに入れてください。
- ③ カップに入れた唾液に、唾液採取用綿棒を3秒以上、充分に浸してください。

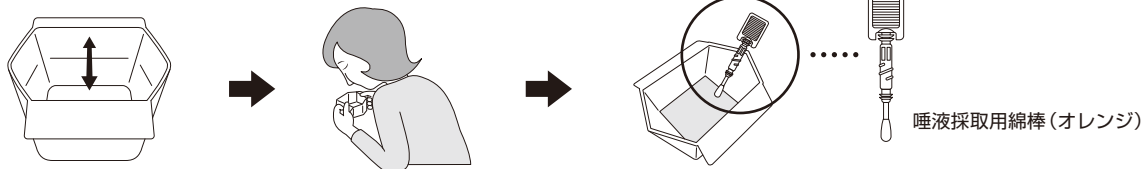

- ④ キャップ(グレー)を取り外して捨て、代わりに唾液採取用綿棒を差し込み、完全に締めてください。
- ⑤ 提出用袋及び唾液採取容器ラベルに氏名、年齢、採取日を記入し、提出してください。

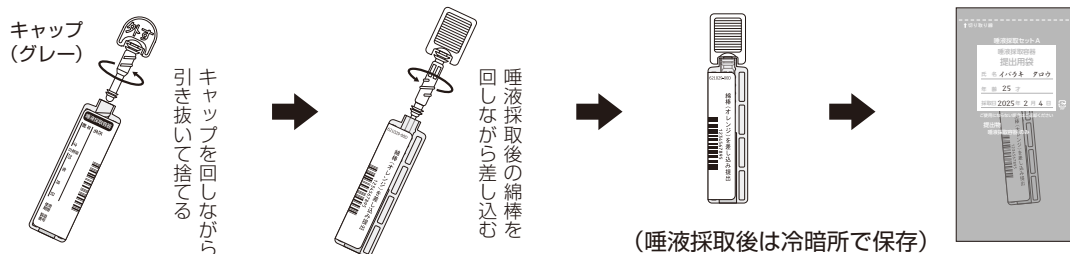

(唾液採取後は冷暗所で保存)

※唾液採取容器のみを提出用袋に入れて提出してください。

【使用上の注意】

1. 綿棒を直接口に入れて唾液を採取したり、唾液採取容器に直接唾液を入れたりしないでください。
2. サリバーガムは、喉に詰まらせないよう注意してください。
3. 唾液採取用綿棒は、カップに入れた唾液に3秒以上、充分に浸してください。
4. キャップ(グレー)は取り外した後、捨ててください。
5. 唾液採取容器の中の液に触れたり、飲んだり、捨てたりしないでください。
6. 使用後のサリバーガムは紙に包んで捨ててください。
7. 子供の手の届かない場所に保管してください。

alfresa

製造販売元 アルフレッサファーマ株式会社
大阪市中央区石町二丁目2番9号
TEL 06-6941-0308