


最終判定
5 min


ヒトメタニューモウイルスキット

イムノエース[®] hMPV

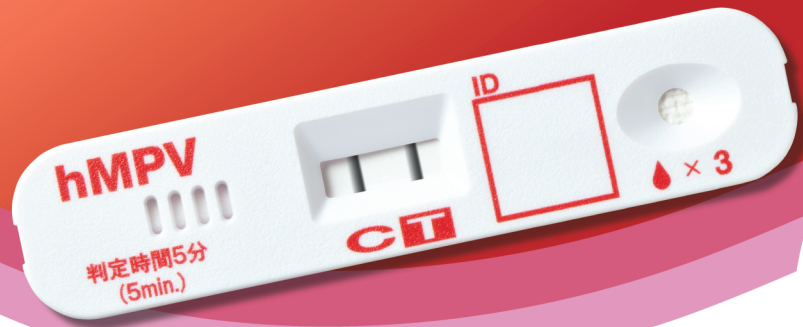

※テストプレートの写真はヒトメタニューモウイルス抗原陽性例です。

- ✓ **最終判定は5分**
陽性の場合、3分から判定が可能
- ✓ **判定ラインはブラックライン**
「白金-金コロイド」を抗体標識物として採用
- ✓ **ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み鼻腔用スワブを採用**
- ✓ **検体の共用が可能**^{注)}
具体的な検体の採取部位等は各キットの添付文書をご参照ください。

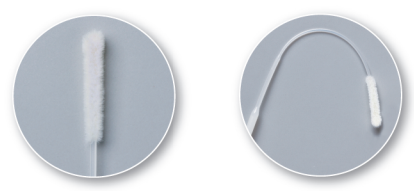

**鼻腔
ぬぐい液**

SARS-CoV-2 Ⅲ
SARS-CoV-2/Flu
Flu・アデノ
RSV Neo・Flu/RSV

**鼻腔
吸引液**


Flu
アデノ
RSV Neo
Flu/RSV

**咽頭
ぬぐい液**

Flu
アデノ

注) 試料調製後の液量や液の性状により、滴下可能なプレートの枚数は変わります。


鼻咽頭ぬぐい液の場合

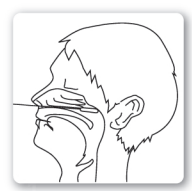


1回の検体採取



1回の抽出操作

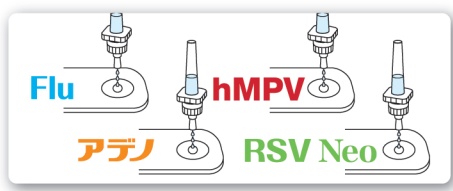

調製した試料をFlu・hMPV・アデノ・RSV Neoのテストプレートに滴下可能

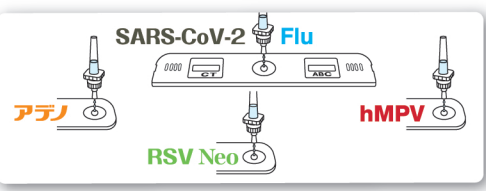

調製した試料をSARS-CoV-2/Flu・アデノ・hMPV・RSV Neoのテストプレートに滴下可能


イムノエース® hMPV

操作方法 ※ご使用前に必ず添付文書をお読みください。

●**検体採取**




●**試料調製**

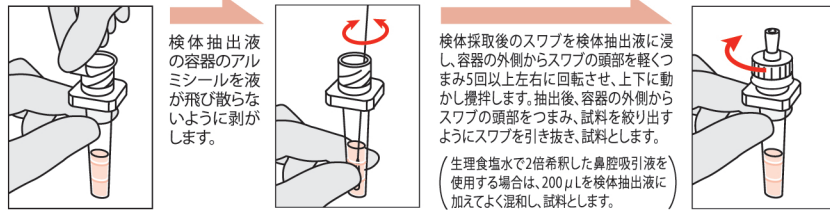

●**試料滴下**

検体抽出液の容器の中ほどをつまみ、テストプレートの試料滴下部に試料**3滴**を滴下します。

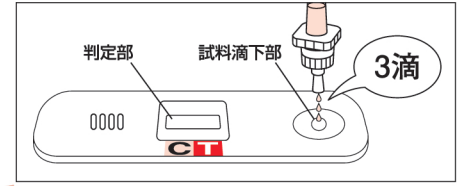

●**判定**



●咽頭ぬぐい液を使用する場合は、別売の「咽頭・角結膜用BRスワブE 50本」(カタログ番号: ACSW7007)をご使用ください。

相関性試験成績 ※本製品添付文書から作成

鼻腔ぬぐい液		PCR		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	80	0	80
	陰性	7	104	111
	合計	87	104	191

陽性一致率: 92.0%
陰性一致率: 100%
全体一致率: 96.3%

鼻腔吸引液		PCR		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	101	0	101
	陰性	15	179	194
	合計	116	179	295

陽性一致率: 87.1%
陰性一致率: 100%
全体一致率: 94.9%

咽頭ぬぐい液		PCR		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	107	0	107
	陰性	10	54	64
	合計	117	54	171

陽性一致率: 91.5%
陰性一致率: 100%
全体一致率: 94.2%

鼻腔ぬぐい液		対照品		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	72	8 ^{注1)}	80
	陰性	0	111	111
	合計	72	119	191

注1) 8検体は全てPCR法陽性
陽性一致率: 100%
陰性一致率: 93.3%
全体一致率: 95.8%

鼻腔吸引液		対照品		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	96	5 ^{注2)}	101
	陰性	0	194	194
	合計	96	199	295

注2) 5検体は全てPCR法陽性
陽性一致率: 100%
陰性一致率: 97.5%
全体一致率: 98.3%

製品概要

測定原理: 免疫クロマトグラフ法
使用目的: 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は咽頭ぬぐい液中のヒトメタニューモウイルス抗原の検出
(ヒトメタニューモウイルス感染の診断の補助)
有効期間: 27ヶ月(製造後)
貯蔵方法: 2~30°Cで保存
保険点数: ヒトメタニューモウイルス抗原定性141点、区分D012 25
(RSウイルス、インフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルスの3項目の抗原定性を併せて実施した場合は、主たるもの2つに限り算定する。ヒトメタニューモウイルス感染症が疑われる6歳未満の患者であって、画像診断又は胸部聴診所見により肺炎が強く疑われる患者を対象として測定をした場合に算定する。)
【令和8年6月1日より適用】

判定時間: 3~5分

製品名		イムノエース®hMPV	
規格	10テスト	10テスト (輸送用スワブ付)	
カタログ番号	IAHM1640	IAHM1620	
JANコード	4987815016401	4987815016203	
希望小売価格(税別)	14,000円	14,200円	
キットの構成	テストプレート	10個	10個
	検体抽出液	10本	10本
	鼻腔用スワブ	10本	10本(輸送用)
	ノズル	10個	10個

テストプレート製品

複数項目の測定が可能
イムノエース®SARS-CoV-2 Ⅲ・イムノエース®SARS-CoV-2/Flu・イムノエース®Flu・イムノエース®アデノ・イムノエース®RSV Neo・イムノエース®Flu/RSV

製品名	イムノエース®hMPV
規格	テストプレート10テスト
カタログ番号	IAHM1650
JANコード	4987815016500
希望小売価格(税別)	10,000円
キットの構成	テストプレート 10個



●複数項目の測定を実施する場合は、イムノエース®SARS-CoV-2 Ⅲ、イムノエース®SARS-CoV-2/Flu、イムノエース®Flu、イムノエース®アデノ、イムノエース®RSV Neo、イムノエース®Flu/RSVの検体抽出液を使用します。



製造販売元
株式会社 タウンズ
〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1
[HP] <https://www.tauns.co.jp/>

お問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル
0120-048-489
受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

販売店