




体外診断用医薬品
製造販売承認番号22300AMX00487000

最終判定
5 min

RSウイルスキット


イムノエース® RSV Neo

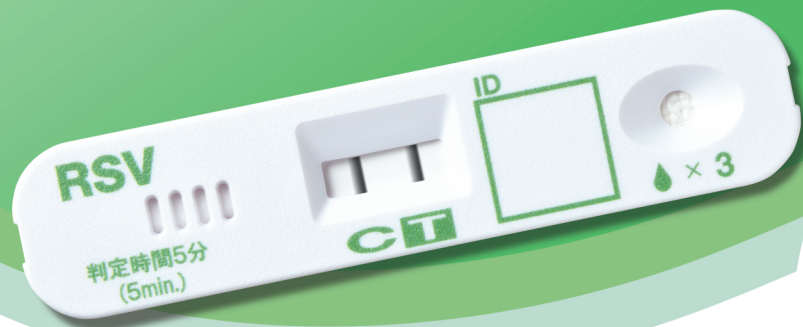

※テストプレートの写真はRSウイルス抗原陽性例です。



- ✓ **最終判定は5分**
陽性の場合、3分から判定が可能
- ✓ **判定ラインはブラックライン**
「白金-金コロイド」を抗体標識物として採用
- ✓ **ナイロン軸で植毛タイプの滅菌済み鼻腔用スワブを採用**
- ✓ **検体の共用が可能**^{注)}
具体的な検体の採取部位等は各キットの添付文書をご参照ください。

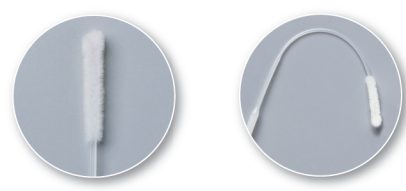

**鼻腔
ぬぐい液**


SARS-CoV-2 Ⅲ
SARS-CoV-2/Flu
Flu・アデノ
hMPV

**鼻腔
吸引液**


Flu
アデノ
hMPV

鼻咽頭ぬぐい液の場合


注) 試料調製後の液量や液の性状により、滴下可能なプレートの枚数は変わります。

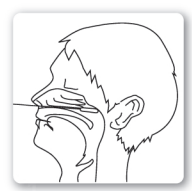


1回の検体採取

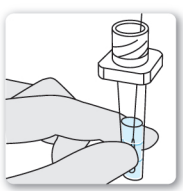

1回の抽出操作

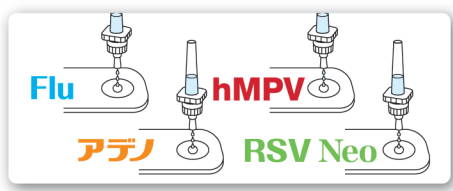

調製した試料をFlu・hMPV・アデノ・RSV Neoのテストプレートに滴下可能

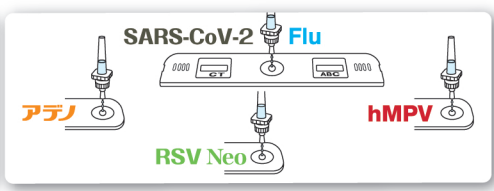


調製した試料をSARS-CoV-2/Flu・アデノ・hMPV・RSV Neoのテストプレートに滴下可能


イムノエース® RSV Neo

操作方法 ※ご使用前に必ず添付文書をお読みください。

●検体採取

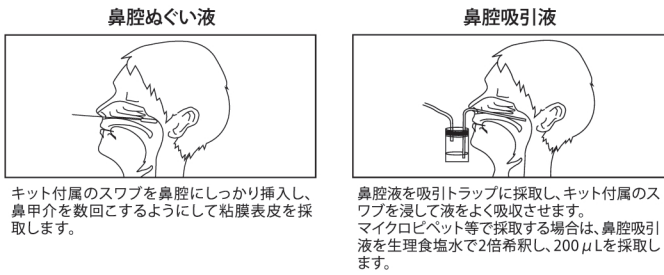


●試料調製

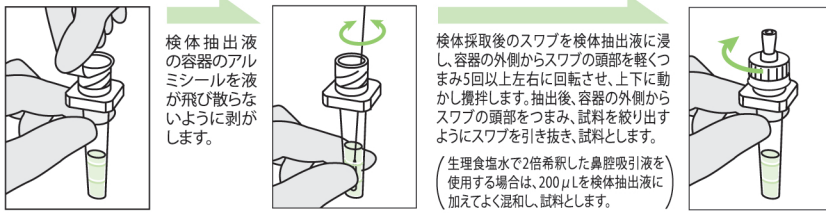


●試料滴下

検体抽出液の容器の中ほどをつまみ、テストプレートの試料滴下部に試料3滴を滴下します。

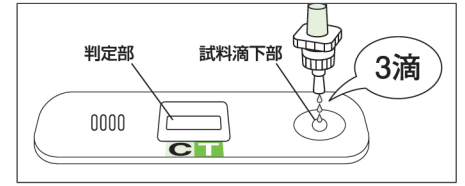

●判定

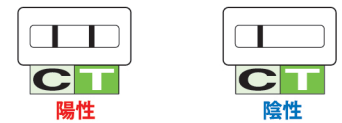

相関性試験成績

※本製品添付文書から作成

| 鼻腔ぬぐい液 | RT-PCR | | |
|--------|--------|-----|-----|
| | 陽性 | 陰性 | 合計 |
| 本品 | 68 | 0 | 68 |
| | 11 | 103 | 114 |
| 合計 | 79 | 103 | 182 |

陽性一致率: 86.1%
陰性一致率: 100%
全体一致率: 94.0%

| 鼻腔ぬぐい液 | 対照品 | | |
|--------|-----|------------------|-----|
| | 陽性 | 陰性 | 合計 |
| 本品 | 62 | 6 ^{注1)} | 68 |
| | 0 | 114 | 114 |
| 合計 | 62 | 120 | 182 |

注1) RT-PCR法 6例全て陽性
陽性一致率: 100%
陰性一致率: 95.0%
全体一致率: 96.7%

| 鼻腔吸引液 | RT-PCR | | |
|-------|--------|----|-----|
| | 陽性 | 陰性 | 合計 |
| 本品 | 69 | 0 | 69 |
| | 15 | 87 | 102 |
| 合計 | 84 | 87 | 171 |

陽性一致率: 82.1%
陰性一致率: 100%
全体一致率: 91.2%

| 鼻腔吸引液 | 対照品 | | |
|-------|------------------|-------------------|-----|
| | 陽性 | 陰性 | 合計 |
| 本品 | 58 | 11 ^{注2)} | 69 |
| | 1 ^{注3)} | 101 | 102 |
| 合計 | 59 | 112 | 171 |

注2) RT-PCR法 11例全て陽性
注3) RT-PCR法 1例陽性
陽性一致率: 98.3%
陰性一致率: 90.2%
全体一致率: 93.0%

製品概要

測定原理: 免疫クロマトグラフ法
使用目的: 鼻腔ぬぐい液又は鼻腔吸引液中のRSウイルス抗原の検出 (RSウイルス感染の診断の補助)
有効期間: 27ヶ月(製造後)
貯蔵方法: 2~30°Cで保存
保険点数: RSウイルス抗原定性138点、区分D012 24
(以下のいずれかに該当する患者について、RSウイルス感染症が疑われる場合に適用する。
ア 入院中の患者
イ 1歳未満の乳児
ウ パリビズマブ製剤又はニルセピマブ製剤の適応となる患者
RSウイルス、インフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルスの3項目の抗原定性を併せて実施した場合は、主たるもの2つに限り算定する。)
【令和8年6月1日より適用】

判定時間: 3~5分

| 製品名 | | イムノエース® RSV Neo | |
|------------|---------------|-----------------|----------|
| 規格 | 10テスト | 30テスト (輸送用スワブ付) | |
| カタログ番号 | IARS0910 | IARS0920 | |
| JANコード | 4987815009106 | 4987815009205 | |
| 希望小売価格(税別) | 12,000円 | 36,600円 | |
| キットの構成 | テストプレート | 10個 | 30個 |
| | 検体抽出液 | 10本 | 30本 |
| | 鼻腔用スワブ | 10本 | 30本(輸送用) |
| | ノズル | 10個 | 30個 |

テストプレート製品

複数項目の測定が可能
イムノエース® SARS-CoV-2 Ⅲ・イムノエース® SARS-CoV-2/Flu・イムノエース® Flu・イムノエース® アデノ・イムノエース® hMPV

| | |
|------------|-----------------|
| 製品名 | イムノエース® RSV Neo |
| 規格 | テストプレート 10テスト |
| カタログ番号 | IARS0930 |
| JANコード | 4987815009304 |
| 希望小売価格(税別) | 8,000円 |
| キットの構成 | テストプレート 10個 |



●複数項目の測定を実施する場合は、イムノエース® SARS-CoV-2 Ⅲ、イムノエース® SARS-CoV-2/Flu、イムノエース® Flu、イムノエース® アデノ、イムノエース® hMPVの検体抽出液を使用します。



製造販売元

株式会社 **タウンス**

〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1

[HP] <https://www.tauns.co.jp/>

お問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル

☎ 0120-048-489

受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

販売店