


イムノエース[®] SARS-CoV-2/Flu II 操作方法

株式会社 **タウンズ**
お問い合わせ先 ☎ 0120-048-489
受付時間／9:00～17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)


■ 検体採取

鼻咽頭ぬぐい液

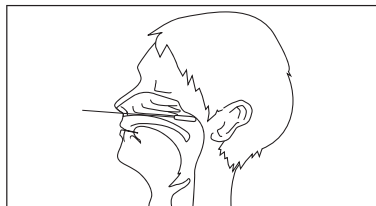


キット付属のスワブを鼻甲介に沿わせながら、
鼻咽頭まで挿入し数回擦るようにして粘膜表皮を採取します。


■ 試料調製

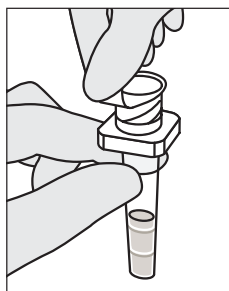

検体抽出液の容
器のアルミシ
ールを液が飛び散
らないように剥
がします。

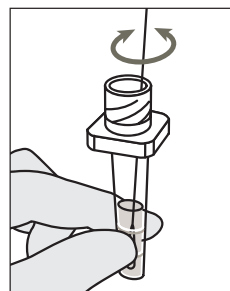


検体採取後のスワブを検体抽出液に浸し、容器
の外側からスワブの頭部を軽くつまみ5回以上
左右に回転させ、上下に動かし攪拌します。
抽出後、容器の外側からスワブの頭部をつま
み、試料を絞り出すようにスワブを引き抜き、
試料とします。

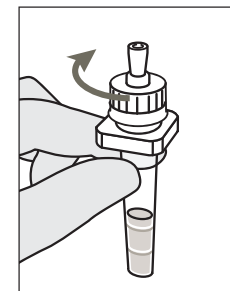

検体抽出液の容
器の上端に付属
のノズルを被せ
てしっかりと閉
めます。

■ 試料滴下

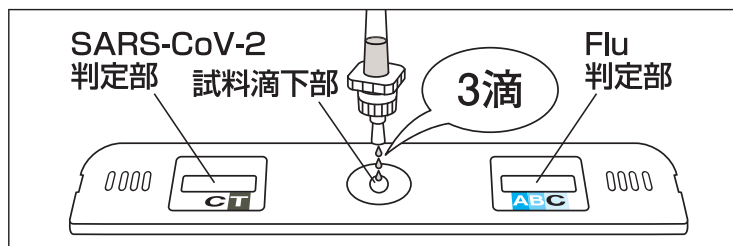


検体抽出液の容器の中ほどをつまみ、
テストプレートの試料滴下部に
試料3滴を滴下します。

⚠ 注意 ———
テストプレートは開封後すぐに使用してください。

注意事項

- ① 滴下するとき、検体抽出液の容器は垂直に保持し、ノズルの先端が試料滴下部に触れないように注意してください。
- ② ラインの濃さにムラがあるものや途切れているものもラインとしては有効です。
- ③ ラインは区分されている各判定部内であれば、その位置にかかわらず有効です。
- ④ フィルターに目詰まりするほどの強粘性の試料は、生理食塩水で2倍希釈して使用してください。
- ⑤ 抗原量が非常に多い場合には、SARS-CoV-2判定部[T]又はFlu判定部[A]又は[B]に非常に濃い黒色のラインが認められ、SARS-CoV-2判定部[C]又はFlu判定部[C]の黒色のラインが薄くなる場合があります。
- ⑥ 滴下量が多すぎた場合には、本品の測定原理から白金-金コロイド標識抗体が希釈されることにより反応が遅延し、判定時間内に判定部[C]及び／又は[A]又は[B]又は[T]にラインが認められない(偽陰性)、又はラインが薄くなる場合があります。

■ 判 定

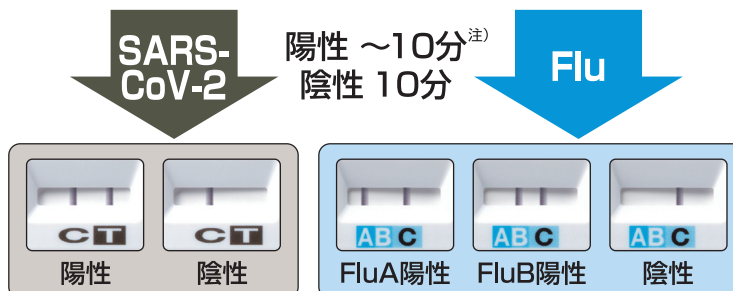

注) 10分より前でも判定部[T]又は[A]又は[B]及び[C]の両方に黒色のラインが認められた場合には陽性と判定してください。