


イムノエース[®] Strep A Neo 操作方法

規格：Type A の場合

株式会社 **タウンズ**
お問い合わせ先 ☎0120-048-489
受付時間／9:00～17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

■ 検体採取

咽頭ぬぐい液

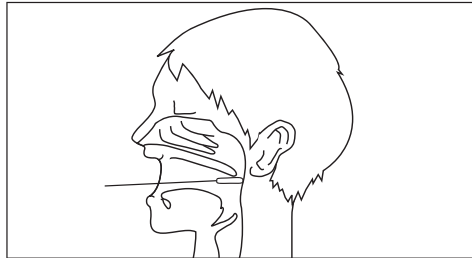


キット付属のスワブを口腔から咽頭にしっかり挿入し、咽頭後壁、口蓋扁桃の発赤部位を中心に数回こするようして粘膜表皮を採取します。検体採取時は、綿球が咽頭以外の口腔内（舌、歯肉、ほほの内側、だ液など）に触れないように注意してください。

試薬1：亜硝酸ナトリウム溶液 **ピンク色**
試薬2：酢酸溶液 **無色**
抽出試薬：試薬1 1本に対して試薬2を**5滴**加えたもの **淡黄色**


■ 試料調製




試薬1の容器のアルミシールを液が飛び散らないように剥がします。

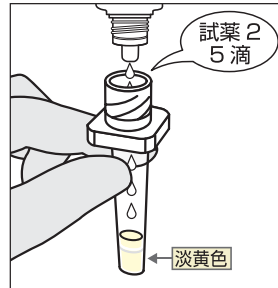

試薬1に対して試薬2を**5滴**加え抽出試薬とします。

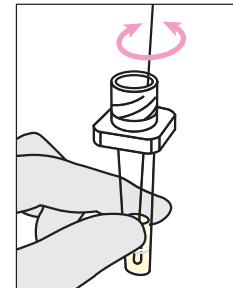


検体採取後のスワブを抽出試薬に浸し、2回以上回転させ、**1分間静置**後、容器の外側からスワブの頭部をしっかりとつまみ、しごく様にスワブを引き抜き、試料とします。

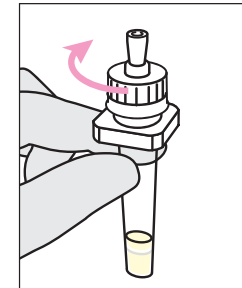

調製した試料が入っている容器の上端に付属のノズルを被せてしっかりと閉めます。

■ 試料滴下

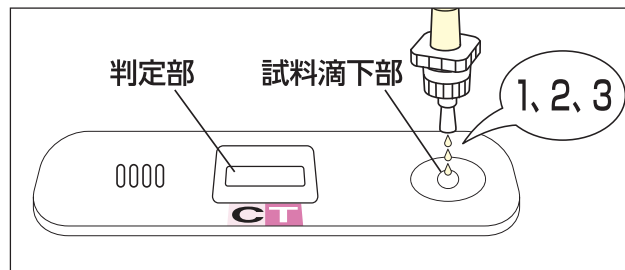

調製した試料が入っている容器の中ほどをつまみ、テストプレートの試料滴下部に試料**3滴**を滴下します。

⚠ 注意
テストプレートは開封後すぐに使用してください。

■ 判定



陽性



陰性

注意事項

- ① 調製後の抽出試薬は保管できません。直ちに使用してください。
- ② 試料を滴下するとき、容器は垂直に保持し、ノズルの先端が試料滴下部に触れないよう注意してください。
- ③ テストラインは、ラインの濃淡にかかわらず、目視で確認できれば陽性です。
- ④ ラインは色分けにより区分されている各判定部内であれば、その位置にかかわらず有効です。
- ⑤ 抗原量が非常に多い場合には、判定部[T]に非常に濃いラインが認められ、判定部[C]にラインが認められないことがあります。このような場合は、新しい抽出試薬1本に対して試料を3滴滴下し、十分に混和し、希釈調製したものを試料としてください。
- ⑥ 静置時間が十分でない場合、抗原の抽出が不十分となり、正しい結果が得られないことがあります。