


最終判定
15 min

ノロウイルス抗原キット

イムノエース[®] ノロ

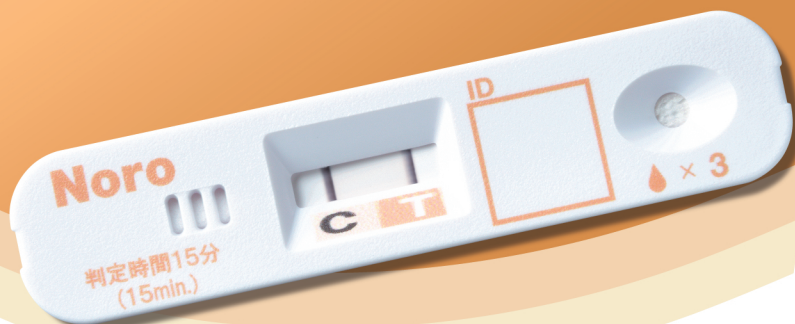


※テストプレートの写真はノロウイルス抗原陽性例です。



- ✓ 判定ラインはブラックライン
「白金-金コロイド」を抗体標識物として採用
- ✓ スワブの輸送用チューブを付属



- ✓ 2種類の検体が使用可能
検体種：排泄便・直腸便
- ✓ 検体抽出液容器の取り間違え防止
検体抽出液容器・ノズルを淡橙に着色

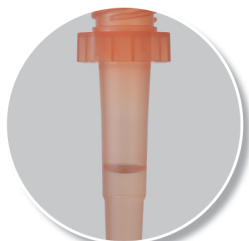

検体抽出液容器



ノズル

遺伝子型との反応性
下記の遺伝子型のノロウイルスと反応することが確認されています
GI.2 [P2]、GI.3 [P3]、GI.4、GI.5、GI.6 [P6]、GI.7 [P7]
GII.2 [P2]、GII.2 [P16]、GII.3 [P12]、GII.4 [P12]
GII.4 [P16]、GII.4 [P31]、GII.6 [P6]、GII.6 [P7]
GII.12、GII.14 [P7]、GII.17 [P17]

イムノエースノロ

操作方法 ※ご使用前に必ず添付文書をお読みください。

●検体採取

排泄便

水様便の場合は少なくともスポンジ部の半分以上にしみ込ませて採取します。固形便の場合はスポンジ部の半分程度を軽く覆うように採取します。

直腸便

患者を傷つけないように十分に注意を払い、スワブを軽く回しながら患者肛門にスポンジ部全体が隠れる程度に挿入し、糞便を採取します。

適切な検体量

水様便: 不足(×), 適量(○), 適量(○)
固形便: 不足(×), 適量(○), 適量(○)

●試料調製

検体抽出液の容器のアルミシールを液が飛び散らないように剥がします。

検体採取後のスワブを検体抽出液が入った容器に浸し、容器の外側からスポンジ部を揉みこいで十分に抽出してください。容器を押しつぶすようにして、スワブから溶液を搾り取るように引き抜き、試料とします。

検体抽出液の容器の上端に付属のノズルを被せてしっかりと閉めます。

●試料滴下

検体抽出液の容器の中ほどをつまみ、テストプレートの試料滴下部に試料3滴を滴下します。

10~15分

●判定

陽性

15分

陰性

輸送用チューブの使用方法

輸送用チューブからキャップを取り外す。

キャップの穴に、検体採取済みのスワブの持ち手部分を装着する。

キャップを装着したスワブをチューブに収める。

【検体採取時】

注意: スワブを装着した輸送用チューブのキャップを持っての検体採取は、スワブが外れる恐れがあるため、行わないでください。

相関性試験成績 ※本製品添付文書から作成

①他社イムノクロマト法との比較

		対照品		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	68	46 ^{注1)}	114
	陰性	7 ^{注2)}	156	163
	合計	75	202	277

注1) 42検体は遺伝子検査で陽性
注2) 5検体は遺伝子検査で陽性
陽性一致率: 90.7%
陰性一致率: 77.2%
全体一致率: 80.9%

②他社EIA法との比較

		対照品		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	55	3 ^{注3)}	58
	陰性	17 ^{注4)}	67	84
	合計	72	70	142

注3) 2検体は遺伝子検査で陽性
注4) 17検体は全て遺伝子検査陽性
陽性一致率: 76.4%
陰性一致率: 95.7%
全体一致率: 85.9%

製品概要

測定原理: 免疫クロマトグラフ法
使用目的: 糞便中のノロウイルス抗原の検出 (ノロウイルス感染の診断の補助)
有効期間: 24ヶ月(製造後)
貯蔵方法: 2~30℃で保存
保険点数: ノロウイルス抗原定性150点、D012 28
(以下のいずれかに該当する患者について、ノロウイルス感染症が疑われる場合に算定する。)
ア 3歳未満の患者
イ 65歳以上の患者
ウ 悪性腫瘍の診断が確定している患者
エ 臓器移植後の患者
オ 抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者)
【令和8年6月1日より適用】
判定時間: 10~15分

製品名	イムノエース®ノロ	
規格	10テスト	
カタログ番号	IANR1810	
JANコード	4987815018108	
希望小売価格(税別)	14,000円	
キットの構成	テストプレート	10個
	検体抽出液	10本
	スポンジスワブ	10本
	ノズル	10個
	輸送用チューブ	10本

●イムノエース®ノロの検体抽出液・ノズル・スワブは本品のみの専用品です。



製造販売元
株式会社 タウンズ
〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1
[HP] <https://www.tauns.co.jp/>

お問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル
0120-048-489
受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

販売店